




detrox[®]

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ГИГИЕНЫ И ДЕЗИНФЕКЦИИ

detro[®] Wash

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ МАШИНА
ДЛЯ ОЧИСТКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ
ЭНДОСКОПОВ

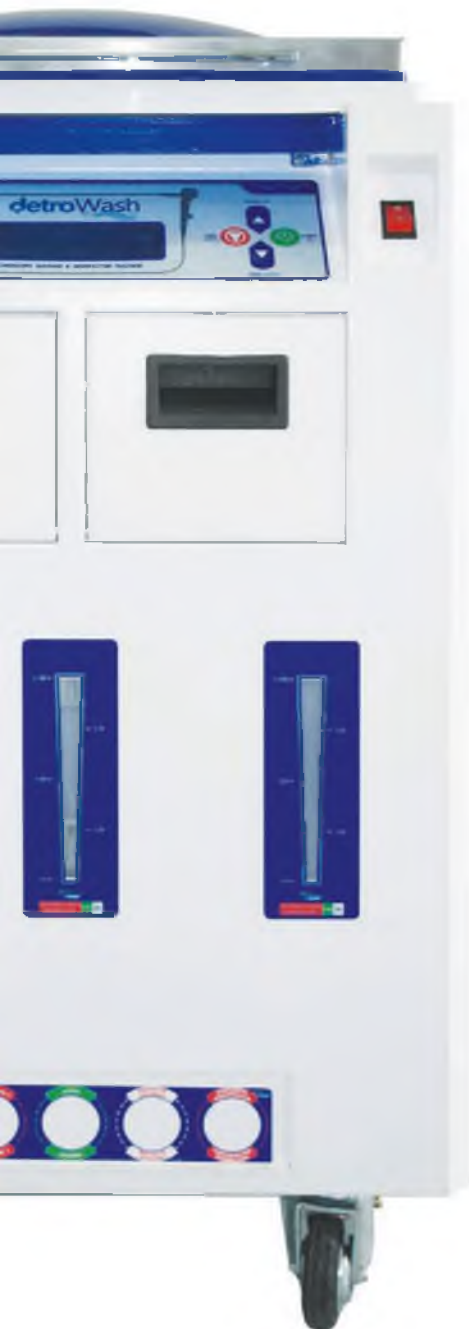

Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов марки Detro Wash

«Detro Wash» обладает рядом уникальных функций, предназначенных для обеспечения унифицированной, надежной, качественной обработки гибких эндоскопов

ОСОБЕННОСТИ:

- Производит мойку, дезинфекцию (ДВУ) и стерилизацию гибких эндоскопов
- Обрабатывает одновременно 1 или 2 гибких эндоскопа
- Встроенная в систему циркуляции воды ультрафиолетовая лампа
- Возможность подогрева дезинфектанта
- Использование «традиционных» дезинфектантов и детергентов
- Сушка эндоскопа воздухом и спиртом
- Наличие автоматического контроля критических параметров цикла обработки эндоскопов с выдачей протокола
- Возможность обработки в одном аппарате разные по виду исследований гибкие эндоскопы (например: колоноскопы и гастроскопы), за счет двух баков для многоазовых дезинфицирующих средств
- Полностью автоматизированный процесс для дезинфекции и стерилизации гибких эндоскопов, качественная очистка всех каналов
- Возможность подключения гибких эндоскопов Olympus, Fujinon, Pentax, Karl Storz, Aohua, SonoScop и др.
- Возможность документирования процесса (принтер)
- Тест на герметичность
- Возможность выбора оптимального алгоритма обработки эндоскопов
- Наличие режима самодезинфекции машины
- Автоматическое приготовление рабочих растворов или применение многоазовых готовых растворов

«Detro Wash» позволяет значительно уменьшить контакт персонала отделения с парами и растворами дезинфицирующих средств и предотвратить их негативное воздействие на здоровье.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емкость баков

Вода, не менее,	15 л
Детергент, не менее,	5 л
Дезинфектант 1 бак, не менее,	15 л
Дезинфектант 2 бак, не менее,	15 л
Концентрированный дезинфектант, не менее,	5 л
Водный раствор спирта, не менее,	5 л

Диапазоны дозирования

Дезинфектанта	от 0 до 250 мл
Детергента	от 0 до 250 мл
Сушка спиртом	от 0 до 250 мл

Диапазон установки значений таймера

Промывка водой:	от «00:00:00» до «59:59:59»
Детергент:	от «00:00:00» до «59:59:59»
Дезинфектант:	от «00:00:00» до «59:59:59»
Сушка воздухом:	от «00:00:00» до «59:59:59»

Разъемы подключения в кювете

Для двух эндоскопов	6 подключений
Для одного эндоскопа	4 подключения

Слив

Принудительный слив, для канализации	1 подключение
Принудительный слив, для растворов	5 подключений

Габариты


Габаритные размеры, не более	600×900×1080 мм
Модуль подвода воды, не более	130×750×500 мм

Система подогрева дезинфектанта от 20°C до 60°C

Тип электропитания: однофазное 220 ± 10% (50/60 Гц) В, с заземлением

Максимальная номинальная мощность 1800 Вт

Detro Wash

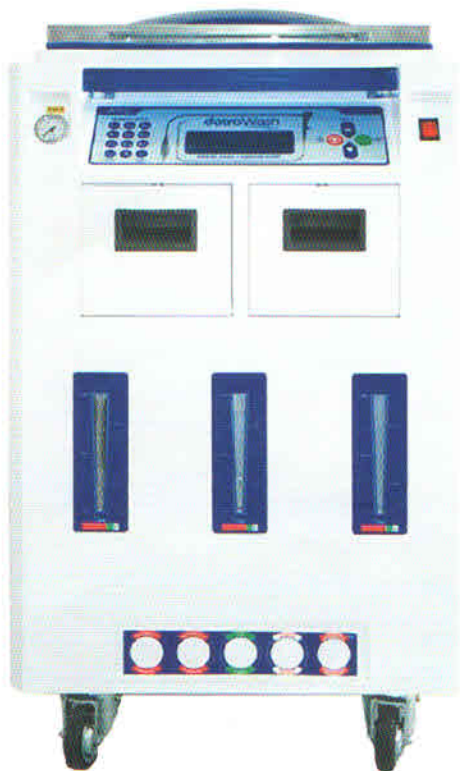

Detro OPA



Detro Enzim



Detro Forte

Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов и дезинфицирующие средства к нему

- Совместимость с гибкими эндоскопами всех типов производителей иностранного и российского производства
- Обрабатывает одновременно 1 или 2 гибких эндоскопа
- Производит мойку, дезинфекцию (ДВУ) и стерилизацию гибких эндоскопов
- Простота использования
- «Открытая система» – не привязана к определенному производителю дезсредств

Detro Wash – обладает рядом уникальных функций, предназначенных для обеспечения унифицированной, надежной, качественной обработки гибких эндоскопов. Позволяет значительно уменьшить контакт персонала отделения с парами и растворами дезинфицирующих средств и предотвратить их негативное воздействие на здоровье.

Основные характеристики

- Обрабатывает одновременно 1 или 2 гибких эндоскопа
- Встроенная в систему циркуляции воды ультрафиолетовая лампа
- Возможность подогрева дезинфектанта
- Возможность документирования процесса (принтер)
- Встроенный тест на герметичность
- Наличие режима самодезинфекции машины
- Сушка эндоскопа воздухом и спиртом
- Возможность обработки в одном аппарате разные по виду исследований гибкие эндоскопы
- Автоматическое приготовление рабочих растворов или применение многоразовых готовых растворов
- 12 программ(каждая из которых свободно программируется под используемое средство)
- Русифицированное управление
- Программирование временных параметров цикла дезинфекции



Модельный ряд Detro Wash

Модель	На 1 эндоскоп	На 2 эндоскопа	1 Бак	2 Бака	У/Ф лампа	Подогрев дезинфектанта	Принтер
5001	+			+			
5002	+			+	+		
5003	+			+		+	
5004	+			+			+
5005	+			+	+	+	
6001	+			+		+	+
6002	+			+	+		+
6003	+			+	+	+	+
6004	+		+				
6005	+		+		+	+	+
7001		+		+			
7002		+		+	+		
7003		+		+		+	
7004		+		+			+
7005		+		+	+	+	
8001		+		+		+	+
8002		+		+	+		+
8003		+		+	+	+	+
8004		+	+				
8005		+	+		+	+	+



Дезинфицирующие средства

Предназначены для дезинфекции и стерилизации:

- Хирургических инструментов
- Жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним
- Стоматологических инструментов
- Инструментов микрохирургии



Detro Forte Дезинфицирующее средство

Концентрат на основе 2% глутарового альдегида

- Готовый к использованию
- Не вызывает коррозию
- Срок использования до 28 дней
- Возможность ручной мойки
- ДВУ – 15 минут
- Объем канистры – 5 л



Detro Enzim

Концентрат моющего средства предназначен для:

- Предварительной
- Окончательной
- Предстерилизационной очистки жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним
- Объем канистры – 5 л



Detro OPA Дезинфицирующее средство

- Готовый раствор
- 0,55 ортофталевого альдегид
- Срок использования до 14 дней
- Возможность ручной мойки
- ДВУ – 5 минут
- Объем канистры – 5 л

Detro[®] Forte



СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ



ОПИСАНИЕ:

- Двухкомпонентное низкотеплое средство на основе глутарового альдегида (2,0%).
- Средство содержит базовый раствор и активатор. Раствор используют после активации.

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

- Бактерицидная (в том числе туберкулоцидная);
- Вирулицидная;
- Фунгицидная;
- Спороцидная.

СВОЙСТВА:

- Применяется для ручного и автоматического использования механизированным способом в мое-дезинфицирующих машинах.
- Не вызывает коррозии и не портит обрабатываемые объекты из различных материалов.
- Для экспресс-контроля концентрации действующего вещества разработаны специальные тест-полоски.
- ДВУ – 15 минут, стерилизация – 90 минут

СРЕДСТВО БЕЗОПАСНО:

- для обработки эндоскопов и инструментов к ним / Рекомендации компаний-производителей (в том числе компании «Karl Storz»/ «Карл Шторц»);
- для обработки стоматологических и хирургических инструментов;
- для обработки изделий из различных материалов (стекла, различных металлов, пластика, каучука, резины и пр.);
- для обработки анестезиологического оборудования и микрохирургического инструментария.

ПРИМЕНЕНИЕ

- В раствор «ДЕТРО ФОРТЕ» / «DETRO FORTE» необходимо погружать только тщательно очищенные инструменты!
- Строго соблюдайте время экспозиции!
- После процесса инструменты удаляются из растворов и промывают стерильной водой.
- Инструменты высушиваются стерильным компрессом или полотенцем.
- При использовании в автоматизированных МДМ, пожалуйста следуйте инструкциям производителя.

Срок годности: средства – 3 года, активированных рабочих растворов – 28 суток.

ОБЪЕМ

5 Л

ISO 13485



Detro[®] ОРА

СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ



ОПИСАНИЕ:

- Готовое к применению низкотеплое средство на основе ортофталевого альдегида (0,55%).

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

- Бактерицидная (в том числе туберкулоцидная);
- Вирулицидная;
- Фунгицидная;
- Спороцидная.

СВОЙСТВА:

- Применяется для ручного и автоматического использования механизированным способом в мое-дезинфицирующих машинах.
- Не вызывает коррозии и не портит обрабатываемые объекты из различных материалов.
- Средство не имеет запаха;
- Низколетучее, не образует вредных испарений и газов.
- Благодаря низкой летучести имеет пониженную токсичность, что обеспечивает безопасность для персонала.
- Для экспресс-контроля концентрации действующего вещества разработаны специальные тест-полоски.
- ДВУ – 5 минут, стерилизация – 30 минут

СРЕДСТВО БЕЗОПАСНО:

- для обработки эндоскопов и инструментов к ним / Рекомендации компаний-производителей (в том числе «Карл Шторц»);
- для обработки стоматологических и хирургических инструментов;
- для обработки изделий из различных материалов (стекла, различных металлов, пластика, каучука, резины и пр.);
- для обработки анестезиологического оборудования и микрохирургического инструментария.

ПРИМЕНЕНИЕ

- В раствор «ДЕТРО ОРА» / «DETRO OPA» необходимо погружать только тщательно очищенные инструменты!
- Строго соблюдайте время экспозиции!
- После процесса инструменты удаляются из растворов и промывают стерильной водой.
- Инструменты высушиваются стерильным компрессом или полотенцем.
- При использовании в автоматизированных МДМ, пожалуйста следуйте инструкциям производителя.

Срок годности: средства – 3 года, рабочих растворов – 14 суток.

ОБЪЕМ

5 Л

ISO 13485



Detro[®] Enzym

ФЕРМЕНТОСОДЕРЖАЩЕЕ
СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ
ПОВЕРХНОСТЕЙ И
ИЗДЕЛИЙ



ОПИСАНИЕ:

- Концентрированное низкопенное средство на основе ферментов (амилаза, липаза, протеаза, целлюлаза), неионогенных ПАВ и ЧАС.

СВОЙСТВА:

- Применяется для ручного и автоматического использования механизированным способом в моюще-дезинфицирующих машинах.
- Не вызывает коррозии и не портит обрабатываемые объекты из различных материалов.
- Высокая эффективность очистки благодаря уникальной формуле.
- Растворы средства не фиксируют органические загрязнения на обрабатываемых изделиях.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения из различных материалов (включая хирургические и стоматологические инструменты ручным способом;
- для предстерилизационной очистки хирургических и стоматологических инструментов механизированным (в том числе с применением ультразвука) способом;
- для предварительной и предстерилизационной очистки эндоскопов и инструментов к ним ручным и механизированным способом;
- для окончательной очистки эндоскопов ручным и механизированным способом перед дезинфекцией высокого уровня (ДВУ).

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Рабочий раствор средства использовать однократно, в течение 24 часов.
- Средство рекомендовано для обработки эндоскопов механизированным способом в автоматических моюще-дезинфицирующих машинах - репроцессорах «Detro Wash», фирмы Detro Healthcare Kimya Sanayi A.Ş, Турция.

Срок годности: 2 года.

ОБЪЕМ

- 1 л
- 2 л
- 5 л

ISO 13485



Detro[®] cid Enzym

ФЕРМЕНТОСОДЕРЖАЩЕЕ
СРЕДСТВО ДЛЯ
ДЕЗИНФЕКЦИИ И ОЧИСТКИ
ПОВЕРХНОСТЕЙ И
ИЗДЕЛИЙ



ОПИСАНИЕ:

- Концентрированное средство содержащее в своем составе смесь панкреатических и бактериальных ферментов, смесь ЧАС, N,N-бис(3-аминопропил)додециламин, неионогенные ПАВ.

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

- Бактерицидная (в том числе туберкулоцидная);
- Вирулицидная;
- Фунгицидная.

СВОЙСТВА:

- Универсальное дезинфицирующее средство с мощным эффектом и широким спектром назначений.
- Средство хорошо смешивается с водой.
- Концентрат и рабочие растворы негорючи, пожаро- и взрывобезопасны, экологически безвредны.
- Растворы средства не портят обрабатываемые поверхности, не обесцвечивают ткани, не фиксируют органические соединения, не вызывают коррозии металлов.
- Средство не совместимо с мылами, анионными поверхностно-активными веществами и синтетическими моющими средствами.
- Средство активно уничтожает биологические пленки грамположительных и грамотрицательных бактерий на абиотических поверхностях.
- Многократность использования рабочих растворов – в течение 30 суток.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Очистка и дезинфекция поверхностей, аппаратуры и оборудования;
- Дезинфекция, совмещенная с очисткой медицинских изделий и эндоскопов;
- Обеззараживания инфицированных пищевых и медицинских отходов класса Б и В;
- Обеззараживания воздуха, систем вентиляции и кондиционирования;
- Обработка объектов пораженных плесенью.

Срок годности: средства – 5 лет, рабочих растворов 30 суток при хранении в закрытых емкостях.

ОБЪЕМ

- 1 л
- 2 л
- 5 л

ISO 13485



®
detrox



detrox®

Виробник:

Detro Healthcare Chemical Industries Co., Стамбул, Туреччина
Торгова марка DETROX®
E-mail: info@detrox.com.tr, www.detrox.com.tr

Дистриб'ютор в Україні - ТОВ «СКАЙ МЕДИКА»

03058, м. Київ, вул. Миколи Гоголя, 5
Тел.: (044) 351-11-12, (044) 351-11-17
E-mail: info@sky-medica.com, www.sky-medica.com